

Installatie handleiding S120.467 Montageset Orion Pro & Comet Pro



Deze montageset wordt op een Orion Pro & Comet Pro gemonteerd. Hierdoor kunt u een Rollator- eifel- of stokhouder achterop deze scootmobiel monteren. Het is ook mogelijk de Inova stokhouder op één van de twee steunen te plaatsen. De modificatie mag alleen uitgevoerd worden door een ervaren vakman. Hier volgen aanwijzingen voor de standaard installatie.

Benodigd gereedschap:

- steeksleutel 10mm.

Plaatsing van de montageset

Verwijder het kiepwielt van de Orion/Comet.

Plaats de montage plaat aan de buitenkant van de beugel. Steek de nieuwe meegeleverde M6 bout door de montageplaat (gat links voor Orion of gat rechts voor Comet) en plaats de kiep wiel terug in de beugel en plaats de Borgmoer op de bout. Draai deze met de hand vast. Zie foto

1. Draai de plaat omhoog en plaats de overgebleven bouten in de vrijgekomen gaten. Foto 2. Plaats de klemstrippen over de bouten en plaats de borgmoeren zie foto 3.



E-mail ondersteuning

Als u vragen of opmerkingen heeft over het opbouwen van het montage set op deze scooter, stuur dan een e-mail naar ons met alle relevante informatie (en foto's), zodat wij u efficiënt kunnen beantwoorden.

Warmerdam Revalidatie Service vof **info@wrsnet.nl**