



## Installatie handleiding S120.464 montageset Minicrosser



Deze montageset wordt op een Trophy 20 gemonteerd. Hierdoor kunt u een Rollator- eifel- of stokhouder achterop deze scootmobiel monteren. Het is ook mogelijk de Inova stokhouder op één van de twee steunen te plaatsen. De modificatie mag alleen uitgevoerd worden door een ervaren vakman. Hier volgen aanwijzingen voor de standaard installatie.

### Benodigd gereedschap:

- Inbussleutel 5mm.

### Plaatsing van de montageset

Deze montagesteun monteert u in de horizontale strip die zich achter op het frame bevindt. De schroefplaat komt aan de binnenzijde van deze strip de glijden hiermee stelt u de breedte in. En aan de buitenzijde komt de montage met de meegeleverde inbusbouten vast geschroefd. Stel voor u deze bouten definitief vast draait en benodigde breedte in. Let er op dat de verlichting zo veel mogelijk zichtbaar blijft. En er voldoende zicht blijft op achterlicht en knipperlicht.



### E-mail ondersteuning

Als u vragen of opmerkingen heeft over het opbouwen van het montage set op deze scooter, stuur dan een e-mail naar ons met alle relevante informatie (en foto's), zodat wij u efficiënt kunnen beantwoorden.

Warmerdam Revalidatie Service vof [info@wrsnet.nl](mailto:info@wrsnet.nl)