



Installatie handleiding S120.465 montageset Vermeiren Carpo 3+4



Deze montageset wordt op een Vermeiren Carpo gemonteerd. Hierdoor kunt u de eiffel-rollator- en stokhouder achterop deze scootmobiel monteren. Het is ook mogelijk de Inova stokhouder op één van de twee steunen te plaatsen. De modificatie mag alleen uitgevoerd worden door een ervaren vakman. Hier volgen aanwijzingen voor de standaard installatie.

Benodigd gereedschap:

- Steeksleutel 13mm

Plaatsing van de montageset

Plaats de montage steun met het grote gat over de dikke bus die aan de antiekiewielbeugel zit. Zorg dat de opname pen 15/15mm aan de buitenzijde komt. Draai de opnamepen verticaal omhoog. Als deze goed staat komen de 2 bout gaten aan beide kanten van de gaffel vrij.

Plaats de gegalvaniseerde schroefplaat in de gaffel en schroef beide zeskantbouten M8x20mm. met borgring door de montage set in de schroefplaat. Draai de bouten stevig vast. Hiermee klemt de montageplaat zich vast tegen de antiekief gaffel.



E-mail ondersteuning

Als u vragen of opmerkingen heeft over het opbouwen van het montage set op deze scooter, stuur dan een e-mail naar ons met alle relevante informatie (en foto's), zodat wij u efficiënt kunnen beantwoorden.

Warmerdam Revalidatie Service vof info@wrsnet.nl