

Gebruiksaanwijzing

Rollatorrek t.b.v. Topro Olympos

Art.nr.: S120 373

Monteer het rek zoals weergegeven op afbeelding 1. De verstelbare haak wijst naar links, het gebogen U-gedeelte van het rek wijst naar rechts.

LET OP: De afstand tussen de grond en de onderzijde van het rek dient minimaal 45cm te bedragen.



Afbeelding 1

Schuif de haak van het rollatorrek naar links en zet deze vast. Plaats de rollator op het rollatorrek met de voorwielen naar links wijzend. Zorg ervoor dat het gebogen U-gedeelte tussen de onderste framebuizen van de rollator valt. Het eenvoudigst is de rollator eerst naar links te kantelen, naar voren te duwen en naar rechts te kantelen.



Afbeelding 2

Duw nu de verstelbare haak tegen de rollator aan, en zet deze vervolgens met de sterknop vast. (zie **afbeelding 3**) Nu is de rollator klaar om met de scootmobiel vervoerd te worden.



Afbeelding 3



Afbeelding 4