

Gebruiksaanwijzing

Rollatorhouder t.b.v. Dolomite Jazz

Art.nr.: S120 475

Draai de sterknop één slag los en schuif de verstelbare haak maximaal naar boven. Draai de sterknop vervolgens licht vast.

Let op: zorg dat de rode beugel aan de bovenzijde van de rollator goed vast zit!



Afbeelding 1

Til de rollator op en hang deze aan de bovenste haak van het rollatorhouder, zoals op afbeelding 2 is weergegeven.

Let op: Voorwielen van de rollator altijd aan de linker zijde van de scootmobiel.



Afbeelding 2

Draai de sterknop één slag los en schuif de verstelbare haak maximaal naar beneden. Draai de sterknop vervolgens vast.

Let op: Het is belangrijk dat de haak maximaal in de hoek zit, zoals in afbeelding 3 is weergegeven.



Afbeelding 3

De rollator dient nu achterop de scootmobiel geplaatst te zijn zoals op afbeelding 4 is weergegeven.

Let op: zorg dat de rode beugel aan de bovenzijde van de rollator goed vast zit!



Afbeelding 4