



Installatie handleiding Rollatorrek S120.171

De rollatorhouder is ontwikkeld voor de Provo rollator. Deze kan gebruikt worden bij rollators die in de lengte opvouwbaar zijn en beschikken over een dwarsbalk onder de zitting. De rollatorhouder wordt gemonteerd aan de achterzijde van de scootmobiel. De installatie mag alleen uitgevoerd worden door een ervaren vakman. Hier volgen aanwijzingen voor de standaard installatie.

Benodigd gereedschap:

- Inbussleutel 3mm
- Steeksleutel 13mm

Plaatsing van het rollatorrek

Als eerste monteert u de juiste montagesteunen op de scootmobiel. Hierdoor ontstaan er 2 opnamepenen van 15x15mm aan de achterkant van de scootmobiel. Het rollatorrek is al voor u gemonteerd dus hier hoeft u niets aan te doen. Dit rek monteert u aan de achterzijde van de scootmobiel op de hierboven beschreven steunen (zorg dat de knik naar achter geplaatst is).

De verstelbare delen **(A)** aan de onderzijde van het rek stelt u op de juiste breedte in en draait de beide zeskantbouten aan de onderzijde vast als deze op de juiste breedte staat. Hierna schuift u het rek over de steunen en draait de zeskantbouten aan de binnenzijde vast. Klap de provo rollator in en hang deze met de horizontale dwarsbeugel in het U vormige gedeelte **(B)**. Schuif daarna de fixatiebeugel **(C)** naar beneden en draai de sterknop vast, hierdoor kan de rollator niet meer omhoog. Stel als laatste de hoogte af met de inbusbout **(D)** zorg dat de rollator niet te laag hangt. Dit i.v.m. het nemen van stoepjes en drempels.



E-mail ondersteuning

Als u vragen of opmerkingen heeft over het installeren van het rollatorrek op de rollator, stuur dan een e-mail naar ons met alle relevante informatie (en foto's), zodat wij u zo efficiënt mogelijk kunnen helpen.

Warmerdam Revalidatie Service vof info@wrsnet.nl