



Installatie handleiding S120.452 montageset Mezzo / Primo



Deze montageset wordt op een Mezzo of Primo gemonteerd. Hierdoor kunt u een Rollator- eifel- of stokhouder achterop deze scootmobiel monteren. Het is ook mogelijk de Inova stokhouder op één van de twee steunen te plaatsen. De modificatie mag alleen uitgevoerd worden door een ervaren vakman. Hier volgen aanwijzingen voor de standaard installatie.

Benodigd gereedschap:

- Inbussleutel 4mm.
- Inbussleutel 6mm.

Plaatsing van de montageset

Verwijder de 2 inbus stelbouten uit de bumper schuin onder het rode achterlicht. Als u dit gedaan heeft komen er 2 schroefgaten hierop monteert u de montageplaat . dit doet u met de koker 15x15mm verticaal omhoog en naar de buitenzijde gericht, zie de foto onder. Schroef de inbusbouten helemaal in de ronde buis . Draai de bouten stevig vast.



E-mail ondersteuning

Als u vragen of opmerkingen heeft over het opbouwen van het montage set op deze scooter, stuur dan een e-mail naar ons met alle relevante informatie (en foto's), zodat wij u efficiënt kunnen beantwoorden.

Warmerdam Revalidatie Service vof info@wrsnet.nl