



Installatie handleiding B019.580 KAB stoel.



Deze beensteunontvangst wordt op een KAB stoel gemonteerd. Deze is geschikt voor onder andere de Trophy en een Orion Pro. Hiermee kunt u de scootmobiel voorzien van een comfort beensteun. De modificatie mag alleen uitgevoerd worden door een ervaren vakman. Hier volgen aanwijzingen voor de standaard installatie.

Benodigd gereedschap:

- Steeksleutel 13mm.

Plaatsing van de montagesteun.

Neem de stoel van de scootmobiel. Draai deze om en verwijder de voorste montagebouten (zie foto 1). Schuif de beensteunontvangst tussen de stoel en de stoelslede en zorg dat de montagegaten van de beensteunontvangst overeen komen met de draadbus gaten. Schroef de bouten aan beide kanten weer stevig vast (foto 2). Zet de stoel weer op de scootmobiel (foto 3).



Foto 1.



Foto 2.



Foto 3.

E-mail ondersteuning

Als u vragen of opmerkingen heeft over het opbouwen van het montage set op deze scooter, stuur dan een e-mail naar ons met alle relevante informatie (en foto's), zodat wij u efficiënt kunnen beantwoorden.

Warmerdam Revalidatie Service vof info@wrsnet.nl