

Gebruiksaanwijzing

Rollatorrek t.b.v. Travixx/Nitro LARGE

Art.nr.: S120 481 Zithoogte 60-63cm


De voorwielen dienen altijd naar links te wijzen bij het plaatsen van de rollator op het ophangrek.

Let op de stokhouder (indien rechts gemonteerd) dient naar achter geschoven te worden. Zie Foto Hieronder.



Verwijder de vergrendelsteun uit het rollatorrek door de sterknop los te draaien.

Zie foto hieronder.

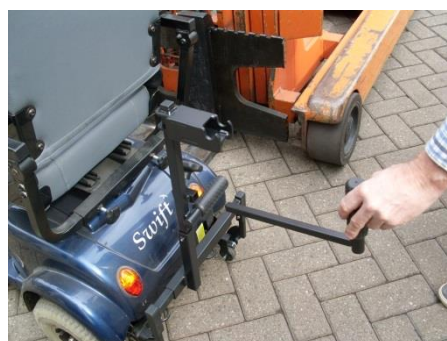

Hang nu het zwarte kunststofblok van het kruisframe in de bovenste steun van het rollatorrek.

Zie foto hieronder.



Monteer nu de vergrendelsteun door deze door het kruisframe te plaatsen . Goed onder spanning tegen de rollator aan duwen en de sterknop stevig aandraaien. Zie foto hieronder



De rollator zal nu meegenomen kunnen worden op de scootmobiel.



REGISTERED DESIGN

Fabrikant: Inova

Radonstraat 169

2718sv Zoetermeer