



HANDLEIDING RTPR003

RT ROLSTOELTECHNIEK
LINDELAUFER GEWANDE 46
6367 AZ VOERENDAAL – NL
WWW.ROLSTOELTECHNIEK.NL
INFO@ROLSTOELTECHNIEK.NL
+31 (0)45 888 54 33



Foldaway – omkeermechaniek manueel bedienbaar

RTPR003



HANDLEIDING RTPR003

RT ROLSTOELTECHNIEK
LINDELAUFER GEWANDE 46
6367 AZ VOERENDAAL – NL
WWW.ROLSTOELTECHNIEK.NL
INFO@ROLSTOELTECHNIEK.NL
+31 (0)45 888 54 33

Belangrijke informatie

Hartelijk dank voor uw aankoop van ons product.

Indien u meer informatie wenst over onze producten verwijzen wij u graag naar onze website: www.rolstoeltechniek.nl

Het is belangrijk dat u de instructies doorneemt voordat u het product in gebruik neemt.

Deze handleiding kan tevens worden gedownload van onze website.

Alle foto's/schema's /tekeningen etc. in deze handleiding zijn gebaseerd op hetgeen dat beschikbaar was op het moment van drukken.

Wij behouden het recht om het product zonder voorafgaande kennis te wijzigen.

Service en ondersteuning

Indien u technische problemen ondervindt, adviseren wij u om contact op te nemen uw dealer/verstrekker. Indien nodig kunt u contact opnemen met RT Rolstoeltechniek via info@rolstoeltechniek.nl

Garantie

Onze garantievoorwaarden staan beschreven in onze algemene voorwaarden. Hiervoor verwijzen wij u naar onze website.

Veiligheid

De foldaway kan op ieder type elektrische rolstoel gemonteerd worden in een werkblad. Onjuist gebruik en verkeerde montage kan letsel veroorzaken bij de gebruiker, of schade aan de rolstoel of andere eigendommen veroorzaken.

Installeer dit product op een rolstoel als de fabrikant van de betreffende rolstoel dit toelaat.

Dit onderdeel mag uitsluiten gemonteerd en geïnstalleerd worden door een servicemonteur met voldoende kennis van zake, om de aanpassing correct uit te voeren

Indien er onduidelijkheden zijn m.b.t. bepaalde wijzigingen of aanpassingen dient u altijd contact op te nemen met uw betreffende servicemonteur.

De elektrische rolstoel dient uitgeschakeld te zijn voordat het mechaniek bediend wordt.



HANDLEIDING RTPR003

RT ROLSTOELTECHNIEK
LINDELAUFER GEWANDE 46
6367 AZ VOERENDAAL – NL
WWW.ROLSTOELTECHNIEK.NL
INFO@ROLSTOELTECHNIEK.NL
+31 (0)45 888 54 33

Werking van de Foldaway

De foldaway is geschikt om het mogelijk te maken om een joystick (verschillende types, waaronder Compact van Permobil en Allround van Mo-vis) neer te klappen zodat er een vlak werkblad ontstaat.


Het neerklappen kan door het mechaniek te ontgrendelen dmv de 20mm ronde knop aan de bovenzijde. Zodra deze bediend wordt kan de joystick 90gr naar voren worden gedraaid tot dat het mechaniek weer vergrendelt. Om de joystick weer in de originele positie te krijgen dient men het mechaniek weer te ontgrendelen dmv het induwen van de knop aan de bovenzijde en de joystick terug in de originele positie te draaien tot dat het mechaniek weer vergrendeld.

Let erop dat de rolstoel altijd is uitgeschakeld tijdens het verdraaien van het mechaniek

Installatie instructies

De foldaway is ontworpen om gemonteerd te worden in een werkblad.

Er zal een gatenpatroon en een uitsparing gemaakt dienen te worden om de foldaway optimaal te kunnen gebruiken.

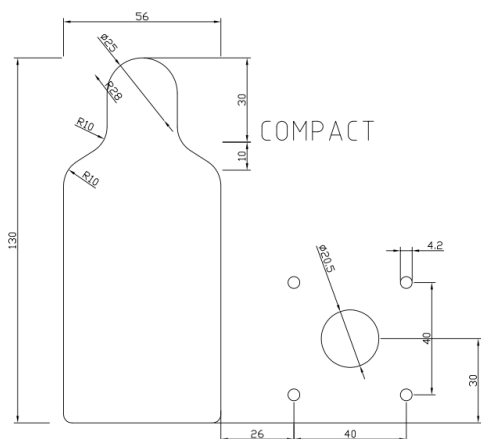

Voorbeeld compact jsm



HANDLEIDING RTPR003

RT ROLSTOELTECHNIEK
LINDELAUFER GEWANDE 46
6367 AZ VOERENDAAL – NL
WWW.ROLSTOELTECHNIEK.NL
INFO@ROLSTOELTECHNIEK.NL
+31 (0)45 888 54 33

Problemen

Indien u problemen ondervindt met het product dient u ten alle tijden contact op te nemen met uw servicemonteur.

Reiniging & Onderhoud

Reinigen van het product kan door vuil en stof af te nemen met een licht vochtige doek.
NB! Dompel het product nooit onder in water of enorme hoeveelheden water gebruiken.
De foldaway is onderhoudsvrij en heeft bij normaal gebruik geen onderhoud nodig.

Technische gegevens

Artikelnummer en omschrijving

- RTPR003 – Foldaway, omkeermechaniek manueel bedienbaar

Materiaal

- Pom-C

Afmetingen

- 58mm x 122mm x 55mm (HxDxB)