



Installatie handleiding D500.100 Duwhandvat verstelsysteem



Dit duwhandvat verstelsysteem maakt het mogelijk om zeer eenvoudig in hoogte verstelbare duwhandvatten te monteren op alle rolstoelen welke uitgerust zijn met vaste duwstangen van Ø22mm. Doordat de draaihoek ook traploos instelbaar is, kan de ideale "fietsstuurstand" worden gecreeerd. Dit systeem is zeer eenvoudig te monteren (en eventueel weer te demonteren), zonder boor of zaagwerkzaamheden aan het originele frame.

Benodigd gereedschap:

- Inbussleutel 5mm.

Plaatsing van het verstelsysteem



Verwijder de bestaande rubberen handvat van de duwstang, hiermee komt de verchromde buis van Ø22mm. vrij. Schuif om de vrijgekomen buis de aluminium klem van Ø22mm. En draai deze vast om de buis Draai de kiephevel los en stel de nieuwe, verstelbare duwhandvat op hoogte en hoek in. (Zie foto hier naast.)

Het nieuwe duwhandvat komt dus boven de oude bestaande duwhandvat. Zodat u als begeleider niet verder achter de rolstoel komt te lopen.

Indien u het montageblok met de Ø22mm. klem achterste voren monteert, steekt het nieuwe duwhandvat verder naar achter en loopt u als begeleider dus verder van de rolstoel af. Dit kan in sommige situaties juist wenselijk zijn.

E-mail ondersteuning

Als u vragen of opmerkingen heeft over het opbouwen van het montage set op deze scooter, stuur dan een e-mail naar ons met alle relevante informatie (en foto's), zodat wij u efficiënt kunnen beantwoorden.

Warmerdam Revalidatie Service vof **info@wrsnet.nl**