

MONTAGEHANDLEIDING

ROLLINOVA® Bumpermontage RHI200BM

t.b.v. Bumpermontage op de scootmobiel



Inhoud van de doos:

1. Rollinova®buis
2. Framesteun compleet
3. Buis van de framesteun
4. Wielsteun
5. Vergrendelsteun
6. Sterknop framesteun
7. Sterknop Rollinova®buis
8. Verstelbare montagesteunen (2x)
9. Houder voor Rollinova®buis
10. Rubber t.b.v. buis 3 (2x)

Om te fixeren zijn 7 tapbouten geplaatst in de onderdelen 2,4,8 en 9. In onderdeel 2 is hiervoor een inwendige inbusbout geplaatst.

Montagegereedschap:

Sleutel 13 en inbussleutel 4.

Let op:

Altijd alle tapbouten zodanig losdraaien dat de Rollinova®buis (1) in de onderdelen 2,4 en 9 geplaatst kan worden bij onderstaande montage!

Volgorde van montage:

Let op: De scootmobiel dient eerst voorzien te worden van een bij te bestellen montageset. Na montage hiervan zijn er 2 rechtopstaande vierkante kokers aanwezig in de buurt van de bumper. Hierop kan nu volgens onderstaande stappen de Rollinova® Bumpermontage worden gemonteerd.

Stap 1: Schuif beide verstelbare montagesteunen (8) in de houder voor Rollinova®buis (9). De middelste tapbout van de houder voor Rollinova®buis (9) moet hierbij naar rechts wijzen! Zie ook hiervoor de afbeelding hierboven.

Stap 2: Plaats nu beide verstelbare montagesteunen (8) over de kokers van de montageset op de scootmobiel.

Stap 3: Schuif nu de houder voor Rollinova®buis (9) in het midden en zet alle 4 de tapbouten (2x van nr 8 en 2x van nr 9) goed vast.

Stap 4: Schuif nu links de framesteun compleet (2) over de Rollinova®buis (1) met hierbij de sterknop van de framesteun (6) naar boven gericht en de sterknop van de Rollinova®buis (7) naar achteren gericht. Deze nog niet vastzetten met de tapbout. De plaatsing van onderdeel (3) volgt pas bij de handleiding : Rollinova® Rollatorhouder afstellen op uw rollator.

Stap 5: Schuif nu, zoals afgebeeld, rechts vanaf onder de wielsteun (4) ongeveer 5cm over de Rollinova®buis (1) en zet deze wielsteun (4) goed vast met de tapbout.*

Stap 6: Plaats nu de Rollinova®buis (1) in de houder voor Rollinova®buis (9). Hierbij is de onderkant van de Rollinova®buis (1) gelijk aan de onderkant van de houder voor de Rollinova®buis (9).

***Let op:** De onderkant van de wielsteun (4) moet altijd minimaal 25cm boven de weg zitten i.v.m. de stoephoogte. Verstel deze dus eventueel nog als deze lager zit na bovenstaande montage.

De Rollinova® Bumpermontage is nu gereed om éénmalig ingesteld te worden op uw rollator.

De juiste hoogte van de Rollinova®buis (1) in de houder (9), hoogte van de framesteun (2) en de instelling van de buis van de framesteun (3) worden beschreven in:

Rollinova® Rollatorhouder afstellen op uw rollator

Voor dit product is octrooi aangevraagd 1044157

Fabrikant Inova Revalidatietechniek Vof- Radonstraat 169- 2718SV -Zoetermeer www.rollatorhouder.nl